

# CryoPen O+

## Dispositivo de criocirugía todo en uno



CryoPen establece un nuevo estándar en el tratamiento criogénico de lesiones cutáneas y pequeños tumores, ofreciendo el máximo control, comodidad y rentabilidad, todo ello sin necesidad de anestesia.

Este lápiz crioterapéutico de alto rendimiento y diseño ergonómico dispensa un fino chorro de óxido nítrico a alta presión, lo que le permite trabajar con precisión milimétrica.

- Diseño ergonómico para un control superior.
- Microtecnología de vanguardia que garantiza un flujo de gas controlado.
- Acepta cartuchos de N<sub>2</sub>O de 8g o 16g fáciles de cargar.
- Cuerpo de aluminio con aplicadores en materiales de grado médico.
- Se suministra con 4 aplicadores autoclavables.
- Adecuado para uso regular.

### DISPOSITIVO

El CryoPen O+ es adecuado para todas las situaciones de tratamiento, ya sea que se requiera una congelación más delicada o de mayor potencia. El dispositivo se puede utilizar con cartuchos de 8g o 16g, y con la gama completa de aplicadores, lo que lo convierte en un instrumento altamente versátil.

### PROCEDIMIENTO

No se requiere preparación especial. Aplica el chorro de óxido nítrico durante 2 a 45 segundos en cada lesión, dependiendo del tamaño y profundidad de la misma. Para lesiones más grandes, utiliza movimientos circulares o de vaivén para tratar todo el tejido.

### ¿QUÉ TIPO DE LESIONES?

Adenoma, distiquiasis, epulis, adenoma del párpado, disfunción de las glándulas de Meibomio, sarcoidosis, verrugas y otros tipos de lesiones, así como tumores benignos y carcinomas.



## Kit de inicio CryoPen 0+

### Aplicadores

Aplicador de 1-3 mm  
Aplicador de 2-6 mm  
Aplicador de 4-8 mm  
Aplicador de 7-20 mm

### Cartuchos 16g

6 cartuchos de 16g

### Accesorios

Estuche de transporte  
metálico  
Pinzas  
Convertidor para cartu-  
chos de 8g  
Soporte para el dispositivo

### Documentación

Resumen del tratamiento  
Manual del usuario

**CR050001**



### Tiempo de flujo continuo con un cartucho de 16g

Aplicador de 7-20 mm - 1 minuto  
Aplicador de 4-8 mm - 2 minutos  
Aplicador de 2-6 mm - 3 minutos  
Aplicador de 1-3 mm - 4 minutos

## CARTUCHOS DE N<sub>2</sub>O



**CR050016**

CAJA DE 6 CARTUCHOS DE N<sub>2</sub>O DE 16GR.