

Férulas Ortopédicas

Las lesiones en las extremidades de los pequeños animales a menudo requieren vendajes o férulas. Esta nueva férula está modelada como las férulas humanas, que son habituales en lesiones de pierna, tarso y pie.

Están compuestas de polipropileno termodeformable para una mayor adaptación a la extremidades anteriores o posteriores del animal.

Recubiertas de Neopreno.
Se prolonga totalmente por debajo del pie.

Las Férulas caninas se pueden utilizar en casos de déficits neurológicos, neuropraxias y otros problemas del plexo braquial y nervio radial.

También las podemos utilizar en casos de fracturas, fisuras e incluso en lesiones de tejido blando que requieran un cierto grado de inmovilización.

MIEMBRO ANTERIOR

TALLA	XL	L	M	S	XS	Feline
PESO	38-55 kg	30-38 kg	18-30 kg	11-18 kg	4,5-11 kg	1-4,5 kg
medida A	18,4 cm	17,8 cm	15,2 cm	13,3 cm	10,8 cm	7,6 cm
medida B	30,5 cm	27,9 cm	26,7 cm	22,9 cm	19,7 cm	14 cm

La **MEDIDA "A"** necesaria para escoger la talla de la férula es la longitud desde la altura del carpo y pasando la cinta por detrás de la extremidad y por debajo del pie, hasta la punta del dedo más largo. La medida XXL está hecha a medida y tardará un poco más que las demás. La medida XXS o Feline se utiliza para perros muy pequeños y para gatos.

La **MEDIDA "B"** no es necesaria pero representa la longitud total de la férula. Utilizando una cinta métrica flexible, y pasándola por debajo del pie del animal, es la medida que va desde la punta del dedo más largo a la mitad de la pata (pon al animal en estación). La férula no debe sobrepasar la altura del codo.

MIEMBRO POSTERIOR


TALLA	XL	L	M	S	XS	Feline
PESO	37-52 kg	28-36 kg	21-27 kg	11-20 kg	5-11 kg	1-4 kg
MEDIDA	28,5 cm	24 cm	20,3 cm	17,8 cm	16,5 cm	10,2 cm

Utilizando una cinta métrica flexible, y pasándola por debajo del pie del animal, es la medida que va desde la punta del dedo más largo a la zona por encima del tarso (pon al animal en estación). La férula no sobrepasará la altura de la rodilla ni soportará lesiones de esta.

NOVEDAD



MIEMBRO ANTERIOR

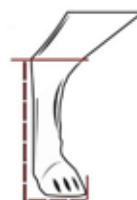

MIEMBRO POSTERIOR

Protectores Ortopédicos


PROTECTOR DE RODILLA CANINO

Puede ser utilizado antes y después de cirugía en casos como artritis crónica, lesión de ligamentos cruzados, artritis, lesión de menisco, problemas con la rótula y tendinitis.

Forma de uso:

El protector de rodilla se tiene que estirar bien hacia arriba por la pierna del perro hasta ajustarse, de forma que cubra la zona de la rodilla correctamente. Coloca la cinta de sujeción que aguanta el protector en su sitio por debajo del abdomen y por encima de la espalda y cierra el velcro por el lado de fuera del protector.

TALLA	RAZAS
XS	Sheltie, Cocker Spaniel, Fox Terrier
S	Kelpie, Whippet
M	Labrador, B Collie, Springer Spaniel
L	Pastor Aleman, Boxer
XL	Rottweiler grande, Boyero de Berna
XXL	San Bernardo, Leonberger

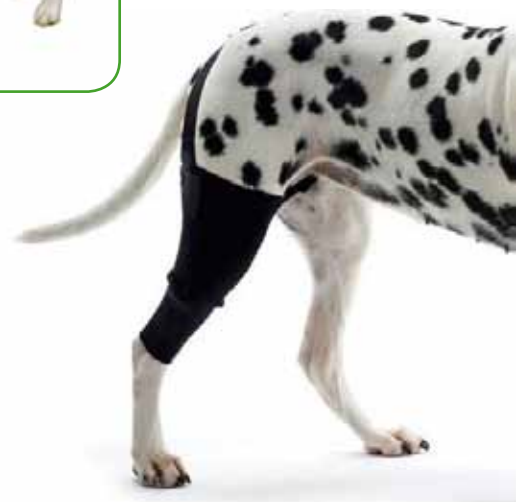

PROTECTOR DE CODO

Indicado para diversos problemas de ligamentos, articulaciones, desgaste del cartílago, úlceras, Artritis, osteoartritis y otras más. En caso post operatorio para protección de la Zona.

Su composición esta destinada a estabilizar la zona y producir calor en articulaciones y músculos, facilitando así una mejor oxigenación de la zona.

Medir alrededor del codo con una cinta métrica y aplicar la siguiente tabla:

TALLA	MEDIDAS
S	de 10cm hasta 13cm
M	de 13,50 hasta 15cm
L	de 15,50 hasta 19cm
XL	de 19,50 hasta 23cm



Protectores Ortopédicos

SOPORTE / PROTECTOR DE TARSO

El soporte/protector de tarso se utiliza en perros con tobillos débiles después de una operación quirúrgica o debido a artritis o lesiones en los ligamentos y tendones.

Función:

Relaja la musculatura antes del trabajo o ejercicio físico. Previene daños en músculos, ligamentos, tendones y articulaciones.

Facilita y acelera el proceso de curación de músculos, ligamentos, tendones y articulaciones dañadas.

Recomendaciones:

Se recomienda su introducción progresiva, los dos o tres primeros días poner el protector sólo durante tres o cuatro horas. Una vez acostumbrado el perro lo puede llevar durante todo el día.

Se puede usar tanto en invierno como en verano, puesto que mantiene el calor del propio perro, no aumenta la temperatura de forma artificial y es transpirable.

Lavable a máquina a 30 °C en el programa de detergente suave sin blanqueador regular o suavizante de telas.

Deje secar al aire, no usar secadora



Para la elección de la talla correcta, mide el tarso de tu perro:

Talla	Perímetro superior	Perímetro inferior
XS	14 cm	10 cm
S	16 cm	12 cm
M	17 cm	13 cm
L	20 cm	16 cm
XL	22 cm	18 cm

SOPORTE / PROTECTOR DE CARPO CON INMOVILIZADOR

Este Soporte/Protector tiene como función Proteger u inmovilizar la zona Carpal, tiene varios niveles de inmovilización ya que en su confección esta compuesta de dos fundas donde se puede introducir una célula de aluminio consiguiendo así dos niveles diferentes de estabilidad, si se pretende dar un nivel bajo/medio de inmovilización se debe retirar la célula actuando así como protector.

Es durable, ajustable, lavable (baja temperatura).



Medir con una cinta métrica el contorno de la pierna del perro a la altura del carpo y aplicar la siguiente tabla:

ESTA INDICADO PARA DIVERSOS USOS:

HIPEREXTENSIÓN CARPAL

ARTROSIS DEL CARPO

USO POST-QUIRÚRGICO

TRATAMIENTO CONSERVADOR.

CARPO INESTABLE

SUSTITUTO DE VENDAJES

Talla	medidas
XS	- de 6 cm
S	6 - 8 cm
M	8-10 cm
L	10 - 12,5 cm
XL	12,5 - 15 cm
XXL	15 - 19 cm
XXXL	+ de 19 cm